

# MASCARILLA KN95 · FICHA TÉCNICA

## Especificaciones

Nombre	YF-MED-MASK KN95
Presentación	10 unidades/bolsa · 5 bolsas/display · 12 display/caja máster = 600 unidades

## Certificaciones

GB 2626-2006 · KN95

## Producto

KN95



## Características

Tipo	Media máscara filtrante
Protección	Aerosoles sólidos y líquidos
Composición	Hilado no tejido (Polipropileno)
Periodo recomendado de uso	8 horas
Reutilizable	NO

## Instrucciones

Lavar las manos con agua y jabón. Despegar las bandas de sujeción usando ambas manos y colocar la mascarilla sobre nariz y boca. Fijar las bandas de sujeción detrás de las orejas. Si fuese necesario, colocar y ajustar la banda metálica que se proporciona sobre la nariz. Para retirarla, hacerlo siempre desde las bandas de sujeción, **NO TOCAR LA PARTE DELANTERA**. Desechar la mascarilla y lavar las manos de nuevo.

**Advertencias:** no es un producto sanitario, no puede utilizarse en quirófano. Es un equipo de protección individual (EPI).

## Test

Requisitos	Resultado	Min. requerido GB2626-2006
Eficacia de filtración (%)	99,5 %	≥95,0 %
Resistencia a la inhalación (mbar/pa) con caudal de ensayo 85 l/min	0,72 mbar/72 pa	3,5 mbar/350 pa
Resistencia a la exhalación (mbar/pa) con caudal de ensayo 85 l/min	0,64 mbar/64 pa	2,5 mbar/250 pa
Fuga total hacia el interior	5,1 %	8 %
Equivalencia norma europea	EN049:2001	
Equivalencia tipo mascarilla europea	FFP2	